

Наръчник за напасване на контактни лещи AVANTI

Емпирично напасване

Предоставете следните данни и ние ще ви изпратим подходяща пробна леща:

- ✓ Рефракция за очила и Вертексна дистанция
- ✓ Кератометрични данни
- ✓ Хоризонтално видим диаметър на ириса (средно 11.50mm)
- ✓ Доминантно око за мултифокални лещи
- ✓ Дизайн за близо (CN) или далеч (CD)

Поради големият избор на параметри, **Avanti** предлага много флексибилна Мултифокална Система. Освен дизайните CN и CD, **Avanti Multifocal** предлага допълнителни опции за оптимизиране на диоптричните зони на доминантното око. По този начин осигурява увеличено зрение и отговаря на индивидуалните нужди на потребителя. В таблицата по-долу, може да видите как да комбинирате тези опции за оптимизиране на зрението.

Мултифокални опции за оптимизиране на зрението на доминантно око:

		Доминантно око	Недоминантно око
Оптимизирано далечно и междинно зрение	Ограничена работа наблизо	CD Dom OP	CD Dom OP
Оптимизирано далечно и междинно зрение	Умерена работа наблизо	CD Dom OP	CD Standard
Оптимизирано далечно и междинно зрение	Усилена работа наблизо	CD Dom OP	CN Standard
Оптимизирано близко зрение	Далечното зрение не е критично	CN DOM Opt	CN DOM Opt
Оптимизирано близко и междинно зрение	Далечното зрение не е толкова критично	CN DOM Opt	CN Standard
Оптимизирано близко и междинно зрение	Далечното зрение е по-критично	CN DOM Opt	CD Standard

***CD Dom Opt** - Доминантно око, Оптимизиран дизайн за далеч

***CN DOM Opt** - Доминантно око, Оптимизиран дизайн за близо

***CD Standard** - Стандартен дизайн за далеч

***CN Standard** - Стандартен дизайн за близо

Avanti имат Свободна форма на стабилизация

Традиционната стабилизация разчита на зони с различна дебелина. Лещата така се ориентира, че да намалее тежестта от най-дебелите зони. При някои потребители обаче, традиционната стабилизация (призматична или динамична) може да дестабилизира лещата, в зависимост от натиска на клепачите и размера на клепачния отвор.


ТРАДИЦИОННА СТАБИЛИЗАЦИЯ



ПРИЗМАТИЧНА
СТАБИЛИЗАЦИЯ

ДИНАМИЧНА
СТАБИЛИЗАЦИЯ

СВОБОДНА ФОРМА

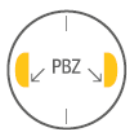

AVANTI
СТАБИЛИЗАЦИЯ

Avanti има две лазерни маркировки за ориентация. Сферичният дизайн също има стабилизация. Тя подпомага за стабилността на зрението, особено при мултифокална корекция.